


## Snabb Guide för Paletto Plus

### Kontrollpanel

Kontrollpanelen med alla inställningar och ljudkortet sitter på baksidan av Paletto. Det förprogrammerade ljudkortet skall föras in på baksidan av Paletto. På bilden nedan ser du kontrollpanelens utseende.

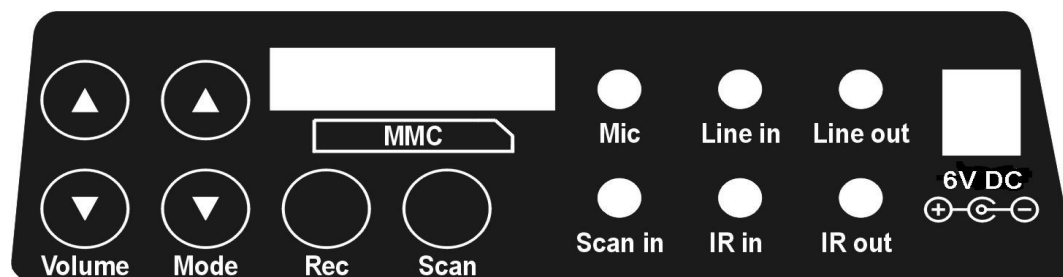

Text	Förklaring
Volume ▲	Knapp för att höja volymen.
Volume ▼	Knapp för att sänka volymen.
Mode ▲	Knapp för att välja ljudgrupp, nivå upp
Mode ▼	Knapp för att välja ljudgrupp, nivå ner.
Rec	Knapp för att spela in via mikrofon eller via line in (dator, minidisc, stereo)
Scan	Knapp för att välja skanningalternativ. (vandrande eller manuell)
MMC	MMC: Här placeras ljudkortet.
Mic	Mikrofonuttag
Line in	Uttag för inspelning via telefon/surfplatta, dator, mp3-spelare eller stereo
Line out	Uttag för externa högtalare förstärkare
Scan in	Uttag för externa kontakter KOM I KAPP kontakt eller annan kontakt.
IR in	Paletto Plus: Uttag för extern IR mottagare
IR out	Används ej
6V DC	Uttag för nätadapter/ strömförsörjning 6V DC

### Ljudgrupperna

Paletto har 8 förprogrammerade ljudgrupper (Ljudgrupp 1-8). Varje grupp har 8 ljud, ett ljud på varje knapp. Totalt 64 förprogrammerade ljud. Dessa ljud kan inte bytas ut eller raderas. En detaljerad lista med alla förinspelade ljud finns i Paletto bruksanvisning som medföljer vid köp.

Egna ljud spelas in på ljudgrupperna 9-16.



Du manövrerar mellan ljudgrupperna med "Mode" knappen på kontrollpanelen.

"Mode ▲" Flytta till en ljudgrupp upp

"Mode ▼" Flytta till en ljudgrupp ner

En röst talar om vilken ljudgrupp du befinner dig på. Ex. Ljudgrupp 1 människoljud

Ljudgrupperna kan inte bytas ut eller raderas. Viktigt! Om Paletto används av flera personer som vill spara sina inspelade ljud så rekommenderar vi att ni köper till fler ljudkort.

## Att spela/ lyssna på inspelningarna

### Grundläggande beskrivning

Alternativ 1: Tryck på de färgade knapparna på Palettos tangentbord.

Alternativ 2: Koppla in en Komikapp-kontakt eller annan typ av kontakt med 3,5 mm telepropp i "Scan In" uttaget på kontrollpanelen.

### Palettos färgade knappar

När du trycker på en färgad knapp på Paletto lyser en röd liten lampa och du hör ett ljud. Du kan bara trycka på en knapp i taget och lyssna färdigt innan du kan trycka på nästa knapp.

### Volym

Höj eller sänk volymen genom att trycka på volymknappen på Palettos kontrollpanel (på baksidan)

"Volume ▲" Höj volymen.

"Volume ▼" Sänk volymen.

En förinspelad röst talar om på vilken volymnivå du befinner dig

## Inspelning

Ljudgrupperna 9 till 16 är till för inspelning. Uttag för mikrofon samt inspelning via extern ljudkälla med 3,5mm anslutning finns på Palettos baksida (Line in). Inspelningsbar tid 17- 20 minuter.

Vid försök att spela in på de förprogrammerade ljudgrupperna 1-8 talar en röst om att detta inte går (error).

### För att spela in

Välj en ljudgrupp (mellan 9-16)

Tryck en gång på "Rec" knappen på kontrollpanelen på baksidan. En röst säger, "spela in via mikrofon" en liten lampa lyser. Tryck på den av knapparna på Palettos tangentbord (där du vill spela in) och spela in. För att spela upp/lyssna av det du spelat in, tryck på samma knapp igen. Nu är det du spelat in lagrat på ljudkortet.

För att försätta spela in, tryck på rec och nästa knapp du vill spela in på osv.

Obs! Håll inte mikrofonen för nära munnen.

Du kan bara spela över det du spelat in genom att spela in på nytt. Du kan också ta bort allt du spelat in på en ljudgrupp (8 knappar) genom att trycka på "Scan" knappen i cirka 5 sec.

Det går även att spela in från telefon eller surfplatta, använd medföljande 3,5mm anslutningskabel i uttaget "Line in". Välj önskad ljudgrupp/knapp på Paletto, tryck "Rec" en gång och starta uppspelning på telefon/surfplatta.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL



### Skanning

Skanningfunktionen är till för dem som behöver en extern kontakt såsom KOMIKAPP kontakt eller annan typ av kontakt med 3,5 mm telepropp. För in kontaktens telepropp i "Scan In" uttaget på kontrollpanelen.

Paletto har 2 skanning inställningar. Du aktiverar dessa genom att trycka på "Scan" knappen bak på kontrollpanelen.

– Automatisk skanning: Tryck på knappen 1 gång. Ett rött ljus vandrar från knapp 1 till knapp 8.

Genom att trycka på den externa touchkontakten kan du sedan stanna och lyssna på det ljud som ligger på knappen du stannat vid,

– Manuell skanning: Tryck på "Scan" knappen igen. För varje tryck på den externa kontakten vandrar du framåt mellan knapparna. En röd lampa visar vilken knapp du befinner dig på. När du stannar, kommer ljudet att spelas upp.

Tryck på "Scan" knappen på baksidan igen och du är tillbaka på "standard" nivån, nu fungerar knapparna som tidigare, utan någon extern kontakt.

### IR funktion

Paletto Plus ha en IR funktion och ett IR-öga, vilket gör att den kan "kommunicera med" Paletto familjen, dvs. bollhav och Paletto väggtavla.

Rikta palettens IR-öga mot den familjemedlem du vill kommunicera med.

**\* Mer teknisk information hittar du i Palettos fullständiga bruksanvisning som medföljer när du köper en Paletto. Du hittar den även på [www.komikapp.se](http://www.komikapp.se)**

Produkten är CE märkt enligt 93/42/EEC och EN71



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL