

ADL-bänken Palle

En på- och avklädningsbänk

Art.nr 500913 och 503612



Bakgrund

Så fungerar Palle

Bänken är tänkt att användas i ADL-situationen av -och påklädning. Det är viktigt att barnet vid tidig ålder medverkar aktivt i ADL-situationer.

Vid av- och påklädning gäller det att komma ner från skötbordet och upp i sittande ställning. Det rörelsehindrade barnet går lätt miste om den naturliga träningen som andra barn påbörjar redan från ca 8 månaders ålder när det kan sitta upp vid av- och påklädning.

Användningsområden:

På en ADL-bänk kan barnet sitta med fötterna i golvet och den vuxna bakom som stöd, ett stöd som man successivt kan minska. Den vuxna stabiliserar barnet så att det får möjligheter att medverka maximalt. Eftersom barnet sitter stabilt får den vuxna en bekväm och avlastande arbetsställning och behöver inte hålla barnet lika mycket som om det satt i knät.

Det barn som efterhand klarar att sitta utan stöd har även i fortsättningen stor hjälp av denna typ av ADL-bänk.



Varufakta art.nr 500913 Palle rektangel

Mått: 79x59cm

Material: Betsad och lackad björk plywood

Ben: Betsad och lackad Bok (medföljer)

Varufakta art.nr 503612 Palle sadelform

Mått: 70x55cm.

Material: Betsad och lackad björk plywood

Ben: Betsad och lackad Bok (medföljer)

Tillbehör: Förhöjningsklossar till benen
Art.nr: 501975




Varufakta art.nr 501975 förhöjningsklossar

Mått: Höjd 5 cm
Material: Betsad och lackad Bok

Montering:

Välj sida (färg) på skivan.
Bänkens ben är monteringsbara på två sätt som ger två olika grundhöjder, 17 och 27 cm.
Dessutom kan ytterligare två höjder erhållas av den flyttbara klossen. Tillbehör 501975.

Om klossen ej kan användas, kan den skruvas fast i den del av benet som inte är i bruk.

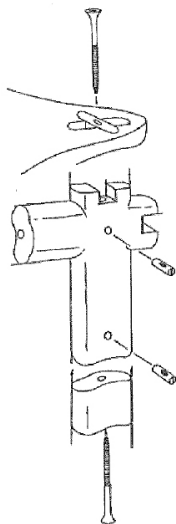

Belastning:

Maxvikt: 150 kg

Rengöring:

Rengör med lätt fuktig trasa eller handsprit.

Produkten är CE märkt enligt 93/42/EEC

