

Bruksanvisning till Paletto Väggmodul

Artikelnummer: 100191 och 100193



Introduktion

Väggpaletto består av två delar:

- Paletto Plus-enhet (endast artikel 100193)
- Väggmödel av lackerad MBF-skiva med förmonterade, rektangulära tryckkontakter i de klassiska Palettofärgerna!

Paletto Plus-enheten kan kopplas bort från väggmodulen och även användas som en separat "bordsmodell"



Montage

Före montage på vägg, var noga med att testa funktionen av de två enheterna ihop.

Väggmodulen har 4 förborrade hål för montage på vägg – skruvar ingår ej i leverans. Om ni är tveksam vilken typ av skruv som ska användas för montage på er vägg, kontakta yrkesman.

- Se till att alla kablar på väggmodulens baksida kan nås från framsidan innan du skruvar fast i vägg. Detta görs enklast genom att hänga fram kablarna över väggmodulens övre kant.
- Koppla nu ihop den medlevererade nätadaptern med DC-kontakten (2) på den svarta IR-dosan bak på väggmodulen.
- Häng Paletto Plus-enheten på de fyra förmonterade skruvarna på väggmodulen genom att mäta in så att "nyckelhålen" på Paletto enhetens baksida är i linje med skruvarna. Med ett lätt tryck inåt och därefter neråt kommer Palettoenheten på plats.
- Koppla därefter IR-kontakten (1) till "IR-in" uttaget samt DC-kontakten (3) från väggmodulen till DC-uttaget på Palettens kontrollpanel (4).
- Koppla nu in nätadaptern i vägguttag. Produkten är klar att användas - antingen via Palettoenhetens tangenter, eller väggmodulens rektangulära tryckkontakter!




1

2

3

(Kan variera i färg:
röd el. Svart)

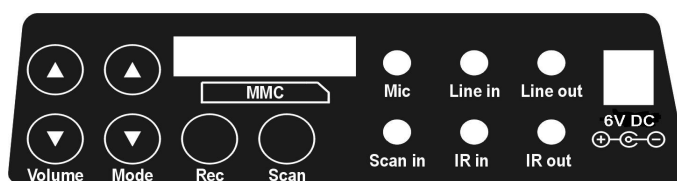

4



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-66 68 70

www.komikapp.se

Underhåll

Paletto Vägghöjningsmodulen är avtorkningsbar med lätt fuktad trasa.

Tekniska data

Nätadapter:	6V DV
IR-koder:	RC5
Mått:	86 x 122 cm
Vikt:	18 kg

Artnr

Reservdelar

Nätadapter 6V/DC EU till Paletto	501946
Externt IR-öga för mottagning 75 cm	501811

Miljö

När produkten är uttjänt

Paletto Vägghöjningsmodulen innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall.



För Paletto's funktioner och möjligheter – se separat medlevererad manual



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-66 68 70
www.komikapp.se