

Bruksanvisning till Musiksäng

Artikelnummer: 100334 och 100335



1 Innehåll

1	INNEHÅLL	2
2	INTRODUKTION	2
3	FÖRBEREDELSE	3
3.1	INNEHÅLL.....	3
3.2	HÖGTALARE OCH LJUDKÄLLOR	3
3.3	PLACERING.....	3
3	MONTERING	3
3.4	SÄNGEN	3
3.5	INSTALLATION AV FÖRSTÄRKARE SAMT HÖGTALARE OCH LJUDKÄLLOR	5
4	ANVÄNDNING	7
4.1	AV/PÅ	7
4.2	INSTÄLLNING AV LJUD OCH VIBRATIONER	7
4.3	INSTRUKTIONER OCH TIPS.....	8
5	UNDERHÅLL OCH SÄKERHET	9
5.1	DYNAN	9
5.2	SÄNGSTOMME OCH ÖVRIGA DELAR.	9
5.3	SÄKERHET	9
6	ÖVRIGT	10
6.1	TILLBEHÖR.....	10
6.2	MILJÖ	10
6.2.1	När produkten är uttjänt	10
6.3	TEKNISKA DATA.....	10

2 Introduktion

Det är vår förhoppning att denna musiksäng skall ge Er en skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje.

Vibrationerna som har en lätt masserande effekt, stimulerar känseln och gör det lätt att slappna av. En härlig känsla inte minst för personer med bristande kroppsuppfattning och nedsatta sinnesfunktioner. Musikvibrationer ger verkningsfull stimulans för många blinda, döva, autistiska, förlamade, hyperaktiva och personer med psykiska problem. För gravt hjärnskadade kan upplevelsen höja livskvaliteten och skapa vägar för kontakt och närhet.

Innan Musiksängen tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna och kringutrustningars bruksanvisningars innehåll.

Alla som handhar musiksängen med kringutrustning MÅSTE läsa igenom och vara införstådda med avsnitt 5 och 6 i denna bruksanvisning.

Musiksängen är lätt att installera men det är viktigt att instruktionerna följs och att skötseln sker omsorgsfullt och regelbundet.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

3 Förberedelser

Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela.

3.1 Innehåll

En musiksäng består av följande delar:

- 1 st säng
- 4 st ben till sängen (4 brickor och 4 muttrar till sängbenen)
- 1 st dyna i PVC galon med fyllning
- 1 st förstärkare STA-200D.
- 1 st 3,5mm kabel för anslutning till extern ljudkälla så som telefon eller surfplatta.

3.2 Högtalare och ljudkällor

Högtalare och ljudkällor ingår inte då dessa i många fall redan finns på plats!

KOMIKAPP rekommenderar att man använder högtalare med en god ljudkvalité.

Det finns möjlighet att använda många olika ljudkällor... Vanligast är att använda en CD-växlare.

Se även avsnitt 6.1-Tillbehör.

3.3 Placering

Se till att placera Musiksängen så att vibrationerna inte fortplantas i husets golv, bjälklag etc. Musiksängen bör placeras på ett ljudisolerande underlag, typ ljuddämpande matta eller liknande.


Tänk på att placera Musiksängen så att i- och urstigning underlättas.

Musiksängen skall ej användas i utrymmen med onormalt hög luftfuktighet eller i våtutrymmen.

3 Montering

3.4 Sängen

1. Montera benen på sängen genom att skruva fast dem i hörnen enligt nedan bild. Ställ gärna sängen på sidan samt höj ryggdelen något med hjälp av fjärrkontrollen för att komma åt och placera bricka och mutter samt dra åt benen ovanifrån.

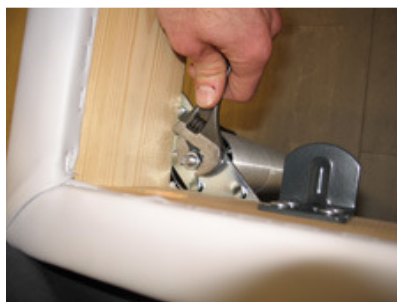

2. Skruva fast muttern ovanifrån på respektive ben enligt bild.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

3. Häng fast fjärrkontrollen till sängen på en av långsidorna och anslut sladden till vägguttaget.
4. Montera madrasstödet. Höj upp fotändan på sängen med hjälp av fjärrkontrollen. Fäst fast madrasstödet mot de skruvar som sitter under sängen genom att skruva åt skruven med den bifogade insektsnyckeln.



5. Lägg på dynan och forma den så att den ligger plant mitt på sängen. Musikängens huvudände och fotända kan ställas med hjälp av fjärrkontrollen.



Upp- och nerhissning av ryggdel
Upp- och nerhissning av fotända
Upp- och nerhissning av både rygg och fotända
Belysning



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL


Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

3.5 Installation av förstärkare samt högtalare och ljudkällor

Förstärkare och annan ljudutrustning skall inte vara anslutna till eluttag när installationen utförs.

Följ instruktionerna med hjälp av bilderna nedan under installation och anslutning.

1. Anslut kabel från Musiksängens undersida till kopplingsboxen på förstärkaren.

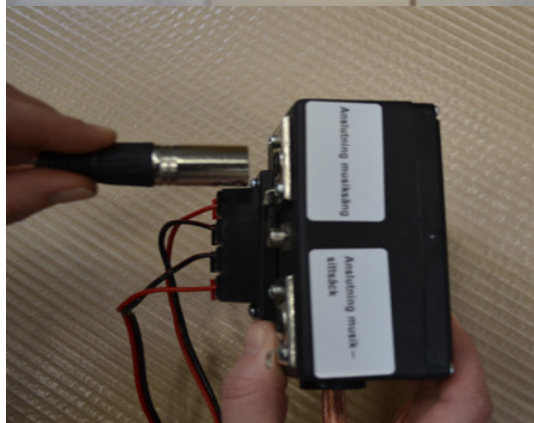

2. Anslut CD-spelare i uttag nr. 1. på baksidan av förstärkaren.

Bild 1 visar inkoppling på baksidan av CD-spelaren (typ Yamaha CD-S300).



Bild 2 visar anslutning av CD-spelare på förstärkarens baksida.



3. Anslutning till extern ljudkälla ex. telefon eller surfplatta. Anslut i uttag nr. 2 på förstärkarens baksida.



4. Anslut högtalarna i kopplingsboxen på förstärkaren. Röd kabel kopplas in i rött uttag och svart kabel kopplas in i svart uttag.



5. Anslut förstärkarens medföljande strömkabel till eluttag när allt är installerat och inkopplat enligt ovan instruktioner.

4 Användning

4.1 Av/På

1. Innan strömmen till förstärkaren och övrig utrustning slås på skall förstärkarens volymreglage och vibrationsreglage vridas ner till lägsta volym (längst till vänster)



2. Slå på strömbrytarna och starta musikanläggningen.
3. Stäng alltid av ljudanläggningen när den inte skall användas längre.

4.2 Inställning av ljud och vibrationer

Vid användandet av musiksängen ställs vibrationer samt ljud från högtalarna (ljudet i rummet) enklast in på följande sätt:

1. Om CD-spelare är ansluten i uttag 1 på förstärkarens baksida måste knapp 1 på förstärkarens framsida vara intryckt för att spela upp ljud från CD-spelaren. Om annan extern ljudkälla ansluts till uttag 2 på förstärkarens baksida måste knapp 2 på förstärkarens framsida vara intryckt. Se nedan bilder.



2. Vrid ner volymen på högtalarna (ljudet i rummet) till minimum genom att vrida vredet på förstärkaren till nolläge.
3. Ställ in rätt mängd vibrationer anpassat till personen som ligger i musiksängen genom att vrida vibrationsreglaget på förstärkaren från nolläge och uppåt till önskad nivå på vibrationerna är uppnådd.
4. Ställ in önskad volym i rummet genom att utgå från nolläget på förstärkaren "volym högtalare" och vrid uppåt till önskad ljudvolym.

4.3 Instruktioner och tips

- Kännbara musikvibrationer skapas främst ur basregistret. Med tanke på de stora variationer av tonhöjd som finns i olika musikstycken, kan det många gånger vara klokt att göra egna inspelningar eller programmeringar på CD-växlare, för att slippa ändra inställningar av ljudvolym, bas etc. när man ligger i musiksängen.
- Vi vill varmt rekommendera att personal/hjälpare alltid själv tar sig god tid att själv pröva olika typer av musik och inställningar *innan* brukarna använder Musiksängen. Utgå från "0"-lägen och reglera volym och övriga kontroller (en i taget) för att uppleva vilka effekter som uppnås. Det är lättare att göra bra inställningar om man först själv utforskat och bekantat sig med utrustningen och de effekter som kan skapas. – Och det blir mycket lättare att välja lämplig musik.
- Vanligt är att man ställer vibrationerna alldeles för högt. Vibrationerna kan då snabbt kännas tröttande och kanske till och med obehagliga. Börja därför alltid med korta pass med svagare musikvibrationer och öka försiktigt.
- Sänk alltid vibrationer och volym när en ny användare tar plats i musiksängen eller då musiken ändras. Bastoner ger t.ex. betydligt kraftfullare vibrationer än musik med toner från mellanregistret. Överraskande sinnesintryck kan verka skrämmande och ge en obehaglig upplevelse för känsliga personer. Vid tillfällen då användaren själv inte kan anpassa musikvibrationerna till behaglig och njutbar nivå, skall alltid ansiktsuttryck och kroppsspråk avläsas av hjälparen som ev. sakta förändrar de inställningar som styr musikupplevelsen. Detta är väldigt viktigt eftersom våra sinnen och våra sinnesupplevelser är högst individuella.
- Tänk på att tjocka kläder och andra textilier på dynan dämpar musikvibrationerna.
- Pröva hur det känns att uppleva musikvibrationerna när Du ligger på mage respektive rygg. Eftersom skelett och mjuka organ har olika resonans, ger varierande lägen helt olika upplevelser.
- För personer med dålig kroppskänsla, för de som är i behov av djup avslappning, för autistiska personer m.fl., vill vi varmt rekommendera kombinationen av musikvibrationer med vårt Bolltäck. *Ring oss för mer information!*



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

5 Underhåll och säkerhet

5.1 Dynan

Dynan är avtorkningsbar med ett mildt rengöringsmedel.

För att förhindra att kroppsvätskor tränger in genom sömmar bör plastade inkontinensskydd användas när detta är befogat.

5.2 Sängstomme och övriga delar.

Rengöring kan ske med en *lätt fuktad trasa* och ett mildt rengöringsmedel.
Använd inte starka lösningsmedel!

Kontrollera regelbundet att stommen känns stabil och att inga muttrar till benen har lossnat.

5.3 Säkerhet

WARNING!

- **Lämna aldrig en funktionshindrad eller sjuk brukare utan uppsikt när han/hon använder Musiksängen. Var speciellt observant på användare som har svårt att röra sig. Andningsvägar kan blockeras om mun och näsa hamnar mot dynan.**
- **Personer med hjärtsjukdomar och inflammatoriska tillstånd skall ej använda Musiksängen. Detsamma gäller gravida.**
- **Sinnesintryck kan ge epileptiska anfall. Håll därför alltid krampbenägna personer under noggrann uppsikt.**
- **Iakttag stor försiktighet med psykotiska personer. Börja med mycket svaga vibrationer och håll god observation på patientens reaktioner och upplevelser.**
- **Musiksängen är en möbel för vila och avslappning. Den skall inte användas att leka i eller för att sova i.**
- **Skydda dynan mot stick från vassa föremål och kanter. Dynan kan skadas av tandbett. Se till att ingen kommer åt att stoppa fyllning i munnen.**
- **Placera inte Musiksängen nära elektriska element, eldstad eller på andra ställen med ökad brandrisk.**
- **Rökning skall undvikas i Musiksängen.**



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se

6 Övrigt

6.1 Tillbehör

Tillbehör	Artnr
Högtalare (2 st)	503880
Högtalarkabel	501017
CD-växlare Yamaha C-600	502906
CD-spelare Yamaha S-300	503876

För CD-skivor; se broschyrer och katalog. Ring oss gärna för förslag!

6.2 Miljö

6.2.1 När produkten är uttjänt

Musiksängen innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall. Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.



6.3 Tekniska data

Material i...

...underrede:	Trästomme klädd i PVC galon, ben i aluminium.
...sängbotten:	Skummadrass klädd i PVC galon
...dyna:	Polystyrenkulor & PVC galon

Storlek: 200x90x50 cm alt. 200x120x50 cm

Vikt: Ca 73 kg

Impedans: 8 Ω per kanal

Effektkrav
förstärkare: 2x60 W (RMS)

Motorn för upp- och nerhissningen har en maxkapacitet på 120 kg och därför rekommenderas att endast en person ligger i sängen när upphissning av ryggläget justeras.