

## Protac MyFit<sup>®</sup>

En sinnesstimulerande bollväst som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning.



## Beskrivning

Protac MyFit<sup>®</sup> är tillverkad i ett stretchmaterial som gör att västen sitter nära kroppen. Västen är utformad med kanaler fram och bak som är fyllda med tunga plastbollar. Västen knäpps med en dragkedja fram – dragsko på sidorna och på ryggen gör att man enkelt kan reglera västen efter användarens behov. Dragskon är dold under tyg för att användaren inte ska fastna.

Bollarnas storlek är 38 mm och västen ger kraftfull stimuli. Bollvästen med 25 mm bollar ger en mer måttlig stimuli.

## Bakgrund

Protac MyFit<sup>®</sup> stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac MyFit<sup>®</sup> har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

## Så fungerar Protac MyFit<sup>®</sup>

SE KORTINFO SID 2

Protac MyFit<sup>®</sup> är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis tryck på överkroppen samt en tyngd, därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskel- och ledsinnet. Stimulansen ökar förmåelsen av kroppen och dess gränser. Västen ökar koncentrationsförmågan och uppmärksamheten, den har även en trygghetsskapande effekt. Protac MyFit<sup>®</sup> ska sitta tätt in på kroppen och storleken baseras på bröstomfånget. Mät runt om bröstkorgen på dess bredaste ställe och jämför med storlekstabellen för att finna rätt storlek.

## Produktfakta

Yttertyg: 100% polyester  
Innertyg: 100% nylon  
Fyllning: 38 mm EVA\*-bollar  
Livslängd: 2 år  
CE-märkning: 93/42/EEG klass 1

## Skötselanvisning

Tvätttråd: 60 grader. Parfympfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Får inte kemtvättas. Använd tvättpåsen som medföljer.

Typ av tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Liggande eller i torktumlaren, max 30 grader.

Västen levereras i en nylonväska.

## PRODUKTINFORMATION

### PROTAC MYFIT<sup>®</sup> BOLLVÄST MED 38 MM BOLLAR

Art. nr	Storlek	Bröstomfång	Vikt
503951	Barn	56-66 cm	ca 1.5 kg
503952	Junior	67-77 cm	ca 2 kg
504417	XXS	70-77 cm	ca 2.5 kg
503953	XS	78-86 cm	ca 3 kg
503954	S	87-95 cm	ca 3.5 kg
503955	M/L	96-106 cm	ca 4.5 kg
503956	XL/2XL	107-115 cm	ca 5.5 kg
503957	3XL/4XL	116-124 cm	ca 6 kg

#### Tillbehör:

503907	Tvättpåse – Barn, Junior, XXS, XS, S
503929	Tvättpåse – M/L
503930	Tvättpåse – XL/2XL, 3XL/4XL
504051	Nylonväska – Barn, Junior, XXS, XS, S
504052	Nylonväska – M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

## Användningsområden


Protac MyFit<sup>®</sup> kan användas i många olika situationer. Den kan användas både i aktivitet och/eller inför en aktivitet. Exempel på användningsområden där användaren har behov av ett stöd för att hantera inre och/eller yttre stimuli är i skolan, daglig verksamhet, arbete, fritidsaktiviteter, sociala miljöer, fysisk aktivitet, ADL-aktiviteter etc. Den kan användas både i stillasittande, stående, eller rörliga aktiviteter. Protac MyFit<sup>®</sup> är tänkt att användas i eller inför valda aktiviteter d.v.s. inte under en hel dag. För mer information se Protacs bruksanvisning.

## Introduktion

- Tänk på att introducera Protac MyFit<sup>®</sup> när användaren har en "bra dag".
- Anpassa graden av stimuli från Protac MyFit<sup>®</sup> med hjälp av de tre snörsystem som västen har.
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac MyFit<sup>®</sup>.
- Introducera Protac MyFit<sup>®</sup> i kortare perioder och med en gradvis ökning av tiden.
- Utvärdera effekten av Protac MyFit<sup>®</sup>, användningstiden är individuell.
- Många upplever att effekten finns kvar en tid efter att västen tagits av, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

## Säkerhet

- Var uppmärksam på användarens reaktion.
- Får inte användas som flytväst eller simdyna.
- Får inte användas av personer med nedsatt balans utan uppsikt.
- Får inte användas av personer som inte kan ta vara på sig själva utan uppsikt.
- Använd ej nära eld.
- Får inte användas när man sover på natten.

 Se ytterligare säkerhetsinformation i Protacs bruksanvisning.

Protac MyFit® tas på och stängs med en dragkedja framtill.



Protac MyFit® har en slits i varje sida. Det gör västen bekväm att ha på sig när man sitter ned.




Protac MyFit® kan justeras på båda sidorna samt i ryggen med en dragsko - det gör att man kan enkelt reglera västen efter användarens behov. Bollvästen ska sitta tätt inpå kroppen.




Av säkerhetsskäl är snörsystemet dolt under tyget.



 I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac MyFit®.

## Skötsel

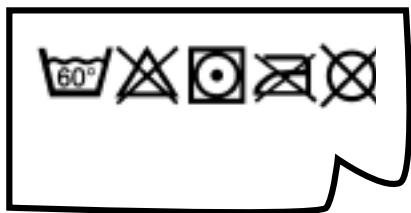

Vi rekommenderar att Protac MyFit® tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Tvättas i medföljande tvättpåse. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

### \*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatser) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, och inte farliga tillsatser är tillsatta, så som Lex, halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

### Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG klass 1



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument