



Art.nr: 503193 Inspelningsbar Kom i håg klämma, 6-pack



Mått: 11x5cm

Behåll denna bruksanvisning för framtida referens, eftersom den innehåller viktig information.

Din klämma innehåller 3x AG13 batterier (ingår)

Batterier får endast bytas av vuxna.

Endast batterier av samma eller motsvarande typ som AG13 ska användas.

Batterierna ska läggas in med rätt polaritet.

Låt inte din klämma komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

Batteribyte:

Ta bort skruven som håller batteriluckan.

Ta bort de förbrukade batterierna och avyttra ansvarsfullt.

Sätt i nya batterier, se till att polariteten är rätt som markerad i batteriluckan.

Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.

Inspelning och användning:

Flytta skjutreglaget på sidan till REC.

Rör vid de två metallkontaktarna i änden av klämman. Klämman piper en gång, den röda lysdioden lyser och användaren kan börja tala i mikrofonen i mitten av enheten.

När inspelningen är klar, rör vid de två metallkontaktarna igen. Klämman piper två gånger för att indikera slutet på inspelningen.

Flytta skjutreglaget på sidan till PLAY.

När du nu rör vid de två metallkontaktarna kommer enheten att spela upp det inspelade ljudet.

Skjut reglaget på sidan till OFF när den inte används, för att bevara batteriets livslängd.



Innehåller smådelar. Ej lämplig för barn under tre år.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg, Tel: +46 340-666870
www.komikapp.se