



Bruksanvisning

Art.nr: 503507 Förkläde inkl tillbehör, blå



Behåll denna bruksanvisning för framtida referens, eftersom den innehåller viktig information.

Användning:

Motoriskt plockförkläde som kan minska oro och stress hos personer med demens, både för män och kvinnor.

Trä förklädet över huvudet och knyt banden bakom ryggen. Om brukaren inte önskar att banden knyts kan de knyts ihop och läggas under förklädet i knät hos brukaren. Se till att de långa banden inte hänger i golvet så att brukaren snubblar på dem om de reser sig upp.

Det sitter en muff mitt fram på förklädet som har ett skönt teddymaterial inuti. Här är det skönt att värma sina händer och känna på teddymaterialet.

Det finns både känselband och en tygpåse att känna på och stoppa saker i.

Tänk på att knäppa loss känselband om brukaren har benägenhet att skada sig på dessa.

Tvättinstruktioner:

Tvättas i max 40 grader

Får ej blekas

Får ej torktumlas

Får ej kemtvättas

Strykjärn max 150 grader

Tillbehören som medföljer plockas av före tvätt och tvättas separat för hand



Innehåller smådelar. Ej lämplig för barn under tre år.



GÖR MORGONDAGEN MENINGSFULL