

Protac Bolldyna™

En sinnesstimulerande bolldyna som ger impulser till en bra sittställning och ökad koncentration.



Beskrivning

Protac Bolldyna™ är tillverkad i ett polyestermaterial, där ovasidan är flamsäker. Undersidan har ett antihalktyg som gör att bolldynan ligger still på stolen.

Protac Bolldyna™ är fylld med 25 mm plastbollar. Bolldynan med 25 mm bollar ger mindre rörelser och mindre punkt- och sinnesstimulering än bolldynan med 38 mm bollar. De små bollarna har en större sittyta, vilket är bra om användaren är mycket smal eller ömhudad.

Bolldynan med 38 mm bollar ger större rörelser samt större punktstimulans och därmed kraftigare sinnesstimulering. Bolldynan som är indelade i fyra fält begränsar bollarnas flexibilitet och sittytan blir mer stabil.

Bakgrund

Protac Bolldyna™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac Bolldyna™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolldyna™

SE KORTINFO SID 2

Protac Bolldyna™ är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis tryck. Teorin utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesintryck och hur man kan påverka olika sinnesstimuli via tyngd och tryck i det taktila sinnet (beröringssinnet) i huden och det proprioceptiva sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder. Bollarnas tryck och rörelse påverkar de här sinnen. Bolldynan ökar koncentrationsförmågan och uppmärksamheten, den har även en trygghetskapande effekt. Placera Protac Bolldyna™ på stolen.

Produktfakta

Yttertyg: 100% polyester
Fyllning: EVA*-bollar
Yttertygets ovasida är flamsäker
Yttertygets undersida är ett antiglidtyg
Livslängd: 5 år
CE-märkning: 93/42/EEG klass 1

PRODUKTINFORMATION

PROTAC BOLLDYNA™ 25 MM BOLLAR

Skötselanvisning

Tvätttråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Lufttorkas.

Art. nr.	Benämning	Mått
502799	Protac Bolldyna™, 25 mm bollar, Dark Grey	30x35 cm
502797	Protac Bolldyna™, 25 mm bollar Dark Grey <small>Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green</small>	40x40 cm
502798	Protac Bolldyna™ med fack, 25 mm bollar, Dark Grey <small>Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green</small>	40x40 cm
504093	Protac Bolldyna™ för höj- och sänkbara stolar, 25 mm bollar, Dark Grey <small>Finns även i färgerna: Aqua, Lime och Dusty Green</small>	40x40 cm

Användningsområde

Protac Bolldyna™ används vid stillasittande aktivitet. Bolldynan kan användas av personer som är motoriskt oroliga och har koncentrations- och inlärningssvårigheter. Protac Bolldyna™ används i skolmiljöer, på arbetet och/eller i hemmet av personer som har svårt att finna ro att sitta still under längre stunder. Bolldynan ger effektiv balansträning och sensitivitetsträning för både barn och vuxna.

Introduktion

- Tänk på att introducera Protac Bolldyna™ när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac Bolldyna™.
- Utvärdera hur effekten av Protac Bolldyna™ blir, användningstiden är individuell.
- Många upplever att effekten finns kvar en tid efter att den använts, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet

- Protac Bolldyna™ ska fästas ordentligt i stolen.
- Uppmärksamma användarens reaktion.
- Får inte användas i rullstoll.
- Får inte användas av personer med förlamning eller sensibilitetsstörningar utan uppsyn.
- Bör inte användas i närheten av öppen eld.
- Se ytterligare säkerhetsinformation i Protacs bruksanvisning.

Användning av produkten

Protac Bolldyna™ ska fästas ordentligt i stolen.



För att få full effekt av sinnesstimulering är det viktigt att Protac Bolldyna™ används på ett hårt underlag.




Det är bra om användaren har något att stödja fötterna på, t.ex. golvet, en pall eller något liknande.




Dynorna har olika fästen. Bolldynan på bilden ovan har snörningar och här bredvid är en bolldyna med snabbfäste. Snabbfästet passar till höj- och sänkbara stolar.



 I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac Bolldyna™.

Skötsel

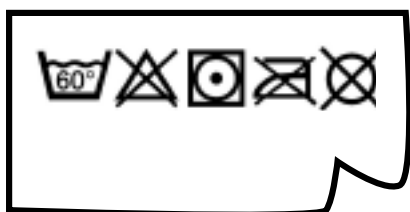

Vi rekommenderar att bolldynan tvättas med parfymfritt/dofsfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatssämnen) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används b.l.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatssämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



Får inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG klass 1