

## Protac KneedMe®

Ett sinnesstimulerande knätäck som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning.



## Beskrivning

Protac KneedMe® är tillverkad i ett polyestermaterial, där ovansidan är flamsäker. Baksidan har ett antihalktyg som gör att knätäckets inte glider.

Protac KneedMe® innehåller kanaler som är fyllda med små tunga plastbollar. Bollarnas storlek är 38 mm.

Art. nr	Färg	Mått	Vikt
504255	Protac KneedMe® Aqua	63x53 cm	4 kg
504256	Protac KneedMe® Lime	63x53 cm	4 kg
504257	Protac KneedMe® Dusty Green	63x53 cm	4 kg

## Bakgrund

Protac KneedMe® stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac KneedMe® har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

## Så fungerar Protac KneedMe® SE KORTINFO SID 2

Protac KneedMe® är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvist tryck samt en tyngd, därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskel- och ledsinnet. Stimulansen ökar förmågan av kroppen och dess gränser. Knätäckets har också en hämmande och organiserande inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Knätäckets ökar koncentrationsförmågan och uppmärksamheten, det har även en trygghetskapande effekt. Placera Protac KneedMe® på nedre delen av magen och låren för en omslutande känsla. Armarna kan vila behagligt i knät med stöd från knätäckets.

## Material

Överdrag: 100% polyester

Innertyg: Polyamid och bomull

Bollsektion: EVA\*-bollar

Överdragets ovansida är flamsäker

### \*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatser) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatserna är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

## Skötselansvisning

Tvätttråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Överdrag och bollsektionen tvättas separat. Vi rekommenderar att medföljande tvättpåse används till bollsektionen.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Bollsektionen kan torktumlas på låg temperatur. Överdraget ska lufttorka.

## Användningsområde

Protac KneedMe® används vid stillasittande aktivitet. Knätäckets kan användas av personer med psykisk och motorisk oro som har svårt att finna ro och sitta still under längre stunder.

## Tillbehör:

Art. nr	Benämning
504308	Extra överdrag Aqua
504309	Extra överdrag Lime
504310	Extra överdrag Dusty Green

## Introduktion

- Tänk på att introducera Protac KneedMe® när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac KneedMe®.
- Minst tio minuter behövs för att Protac KneedMe® effekt ska märkas.
- Introducera Protac KneedMe® i kortare perioder och med en gradvis ökning av tiden.
- Utvärdera hur effekten av Protac KneedMe® blir, användningstiden är individuell.
- Många upplever att Protac KneedMe®s effekt finns kvar en tid efter att den tagits av, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

## Säkerhet

Protac KneedMe® är inte avsedd att användas för att begränsa den personliga friheten eller som säkerhetsanordning.

- ⚠ Om användarens rörelser eller nedsatta kognitiva förmåga leder till att han eller hon oavsiktligt tar av sig täcket, rekommenderas det att användaren hålls under uppsyn.
- ⚠ Var uppmärksam på att förebygga trycksår vid användning av tyngdprodukter.
- ⚠ Om det uppstår rodnad eller irritation på användarens lår eller säte när knätäckets används bör användningen upphöra.
- ⚠ Får inte användas av barn.
- ⚠ Använda ej nära eld.

## Användning av produkten

Placera Protac KneedMe<sup>®</sup> på nedre delen av magen och låren för en omslutande känsla. Armarna kan vila behagligt i knät med stöd från knätäcket.



Protac KneedMe<sup>®</sup> kan vikas ihop och kan bäras med i tillhörande väska.



Stick in händerna i fickorna och låt dem vila i knät.



I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac KneedMe<sup>®</sup>.

### Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



Får inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG