

Protac KneedMe[®] To Go

Ett sinnesstimulerande knätäck för ungdomar som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning.



Beskrivning

Protac KneedMe[®] To Go är tillverkad i ett polyestermaterial, där ovasidan är flamsäker. Baksidan har ett antihalktyg som gör att knätäcket inte glider.

Protac KneedMe[®] To Go innehåller kanaler som är fyllda med små tunga plastbollar. Knätäcket har en axelrem så att du lätt kan bära med det. Bollarnas storlek är 38 mm.

Art. Nr	Benämning	Mått	Vikt
504291	Protac KneedMe [®] To Go Aqua	65x42 cm	3.2 kg
504292	Protac KneedMe [®] To Go Lime	65x42 cm	3.2 kg
504293	Protac KneedMe [®] To Go Dark grey	65x42 cm	3.2 kg

Bakgrund

Protac KneedMe[®] To Go stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Protac KneedMe[®] To Go har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac KneedMe[®] To Go

Protac KneedMe[®] To Go är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis tryck samt en tyngd, därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskel- och ledsinnet. Stimulansen ökar förmågan att känna kroppen och dess gränser. Knätäcket har också en hämmande och organiserande inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Knätäcket ökar koncentrationsförmågan och uppmärksamheten, det har även en trygghetsskapande effekt. Placera Protac KneedMe[®] To Go på nedre delen av magen och låren för en omslutande känsla. Armarna kan vila behagligt i knät med stöd från knätäcket. [SE KORTINFO SID 2](#)

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatser) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatser är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

Material

Överdrag: 100% polyester

Innertyg: polyamid och bomull

Bollsektion: EVA*-bollar

Överdragets ovasida är flamsäker

Skötselanvisning

Tvättråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Får inte kemtvättas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Överdrag och bollsektionen tvättas separat. Vi rekommenderar att medföljande tvättpåse används till bollsektionen.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Bollsektionen kan torktumlas, max 30 grader. Överdraget ska lufttorka.

Användningsområde

Protac KneedMe[®] To Go används vid stillasittande aktivitet. Knätäcket kan användas av personer med psykisk och motorisk oro som har svårt att finna ro och sitta still under längre stunder.

Introduktion

- Tänk på att introducera Protac KneedMe[®] To Go när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac KneedMe[®] To Go.
- Minst tio minuter behövs för att Protac KneedMe[®] To Go effekt ska märkas.
- Utvärdera hur effekten av Protac KneedMe[®] To Go blir, användningstiden är individuell.
- Många upplever att Protac KneedMe[®] To Go effekt finns kvar en tid efter att den tagits av, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet

- Protac KneedMe[®] To Go är inte avsedd att användas för att begränsa den personliga friheten eller som säkerhetsanordning.

- Axelremmen ska inte användas som bälte.

- Om användarens rörelser eller nedsatta kognitiva förmåga leder till att han eller hon oavsiktligen tar av sig täcket, rekommenderas det att användaren hålls under uppsyn.

- Var uppmärksam på att förebygga trycksår vid användning av tyngdprodukter.


- Om det uppstår rodnad eller irritation på användarens lår eller säte när knätäcket används bör användningen upphöra.

- Var försiktig så att du inte snubblar på axelremmen.

- Använd ej nära eld.

Användning av produkten


Placera Protac KneedMe[®] To Go på nedre delen av magen och låren för en omslutande känsla. Armarna kan vila behagligt i knät med stöd från knätäcket.

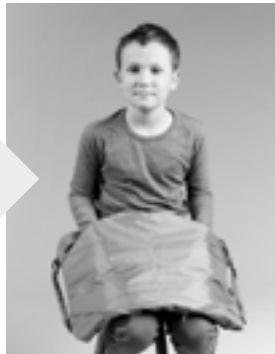

Öppna blixtlåsen i knätäckets hörn. Stick in händerna och låt dem vila i knät.




Protac KneedMe[®] To Go kan vikas ihop och bäras i handtagen.

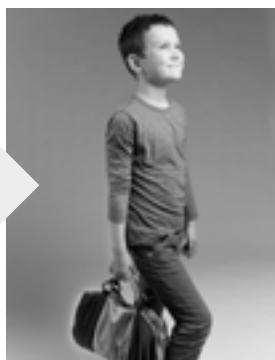

Sätt på axelremmen genom att föra karbinhaken genom den första ringen och fäst den sedan i den andra ringen.




Protac KneedMe[®] To Go kan vikas ihop och bäras med axelremmen.

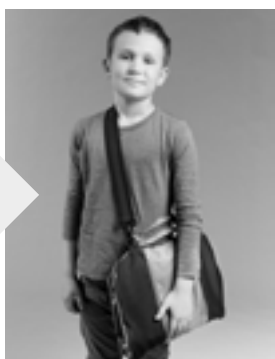

Förvara dina saker i Protac KneedMe[®] To Go. Vik knätäcket med blixtlåsen inåt och gummimaterialet utåt för bästa skydd.



 I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac KneedMe[®].

Symbolförklaring



Max tvättemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



Får inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG