

Protac SensCircle[®]

En sinnesstimulerande multikudde som lugnar, avgränsar och ger en bättre kroppsuppfattning.



Beskrivning

Protac SensCircles[®] överdrag är tillverkad i ett flamsäkert polyestermaterial.

Multikudden består av tre moduler och ett överdrag. Den enskilda modulen är fylld med antingen 50 mm bollar eller polystyrenkulor.

Bakgrund

Protac SensCircle[®] stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac SensCircle[®] har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac SensCircle[®]

Protac SensCircle[®] ger ett punktvis tryck som verkar lugnande för hjärnan. Den stimulerar såväl beröringssinnet som muskel- och ledsinnet. Stimulansen ökar förmågan att känna kroppen och dess gränser. Multikudden har också en hämmande och organiserande inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Den lugnande sinnesstimulansen i kudden ger lindrar oro, ångest och stress.

Material

Överdrag: 100% polyester

Överdrag innersektion: 50% polyester och 50% P.U

Moduler: EVA*-bollar och polystyrenkulor

Överdragets utsida är flamsäkert

Skötselansvisning

Tvätttråd: 60 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna.

Överdrag och fyllningssektionerna tvättas separat. Vi rekommenderar att medföljande tvättpåse används till modulerna.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 16 kg.

Torkning: Modulerna kan torktumlas på låg temperatur. Överdraget ska lufttorka.

Art. Nr	Färg	Mått	Vikt
504185	Protac SensCircle [®] Aqua	250x35 cm	ca 4.5 kg
504226	Protac SensCircle [®] Lime	250x35 cm	ca 4.5 kg
504225	Protac SensCircle [®] Mörkgrå	250x35 cm	ca 4.5 kg

Användningsområde SE KORTINFO SID 2

Protac SensCircle[®] kan användas till både aktivitet, inlärning, vila och avskärmning. Dess längd gör det möjligt att omsluta sig och därmed avskärmar sig från sinnesintryck. Exempel på användningsområden där användaren är i behov av ett stöd för att hantera inre och/eller yttre stimuli är i daglig verksamhet, arbete fritidsaktiviteter, sociala miljöer, ADL-aktiviteter etc.

Introduktion

- Tänk på att introducera Protac SensCircle[®] när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac SensCircle[®].
- Minst tio minuter behövs för att Protac SensCircle[®] effekt ska märkas.
- Introducera de olika positionerna Protac SensCircle[®] kan användas i.
- Många upplever att Protac SensCircle[®] effekt finns kvar en tid efter att den tagits av, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet

- ⚠ Var uppmärksam på användarens reaktion. Om användaren inte reagerar på att vara omsluten av kudden kan det yttra sig som vredsbrott och oro.
- ⚠ Var uppmärksam på att användaren inte har det för varmt när han eller hon omsluts av kudden.
- ⚠ Var uppmärksam på om det finns bollar som skapar obehag för användaren. Det är särskilt viktigt om han eller hon själv inte kan röra sig.
- ⚠ Användare med andningsbesvär måste alltid hållas under uppsikt.
- ⚠ Användare som inte är fysiskt eller psykiskt kapabla att ta hand om sig själva ska inte lämnas utan uppsikt.
- ⚠ Använd ej nära eld.
- ⚠ Var noggrann när du sätter på Protac SensCircle[®], så att ingen kan snubbla.
- ⚠ Får inte användas utomhus.

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummi mjuk utan mjukgörande tillsatser) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatser är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

Användning av produkten

Protac SensCircle® kan användas:

1. som ryggstöd när man sitter upp, t.ex. i en säng.
2. när man ligger ner.
3. att packa in kroppen i.
4. som avgränsning för övre delen av kroppen.
5. som stol.
6. som grotta.
7. att ligga på.



I Protacs bruksanvisning finns mer information om Protac SensCircle®.

Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



För inomhusbruk



Produktnumret



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG