

Användarmanual för Joyvest terapeutisk musikkram

The Hug

Omfamnar som en go kram



MusicBox

Musikspelaren med
favoritmusik



MotionSens

Vid rörelse spelas musiken


Starta



Stäng av



Två knappar

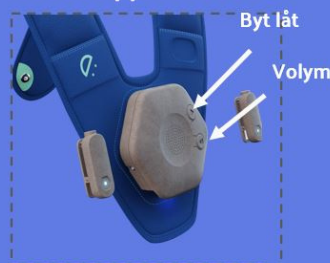

Västen hängs på användaren. Klämmorna fästs enkelt på tröjans ärmslut, eller hålls i händerna. Musiken startar när användaren rör sig och slutar när användaren står still.



Produkten går att tvätta i 60°C och kan också spritas av. OBS! Ta av MusicBox innan tvätt.



Batteriet håller för ca 10 timmars användande. Vid normalt bruk är det oftast mer än 10 dagar. Laddas med medföljande USB-kabel.



Koppla in hörlurar med 3.5mm AUX-sladd.



För att byta musik kopplar man enkelt in Joyvest till en dator med den medföljande USB-kabeln.