

Protac Bolltäcke™ – ett rogivande och
sinnesstimulerande hjälpmedel



Bakgrund

Protac Bolltäcke™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac Bolltäcke™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolltäcke™

Teorin (SI) utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesintryck och hur man kan påverka olika sinnesstimuli via tyngd och tryck i det taktila sinnet (beröringssinnet) i huden och det proprioceptiva sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder. Bollarnas tryck, rörelse och tyngd påverkar de här sinnen. Protac Bolltäcke™ har en rogivande och trygghetsskapande effekt.

Materialval

Protac Bolltäcke™ tillverkas i bomull eller trevira CS* (flamskyddat).

Protac Bolltäcke™ tillverkas med olika storlekar på bollar. 50 mm stora bollar i vuxentäcke "L" (en vuxen person har ca 50 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).

Varufakta art.nr 504427

Protac Bolltäcke™ Flexible 50 mm bollar L Bomull ca 12 kg

Flexible serien är indelade i fickor med två eller fyra bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas. Flexible modellerna gör det också möjligt att sätta ihop ett eget täcke utifrån användarens behov av sinnesstimulans.

Innehåll: Fyra uttagbara kassetter fyllda med 50 mm EVA-bollar.

Storlek: 140x200 cm

Material: Bomull

Tillverkarens artikelkod: 100-201-V-12-85_KK

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gumminjuk utan mjukgörande tillsatssämnen) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används bl.a. till nappor, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatssämnen är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyester typ med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepad tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gällande brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibren har dessutom en hög ljusåthet, det vill säga en lägre grad av blekning.

Vikt: ca 12 kg

Skötselanvisning

SE KORTINFO SID 2

Ta ut påsarna ur överdraget. Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel.

Användningsområden

SE KORTINFO SID 2

Många använder Protac Bolltäcke™ både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsuppfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under Protac Bolltäcke™ finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsuppfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion av Protac Bolltäcke™

SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska ligga under täcket.
- Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt ska märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren från fötterna och upp.
- Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och upp.

Om personen upplever ökad värme i samband med användande av Protac Bolltäcke™, sänk temperaturen i sov miljön.

Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503388
Inkontinensskydd - 500454
Vadderat överdrag bomull - 503644
Transportväska - 503765

Reservdelar:

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäcke™ Flexible L Bomull - 503932
Kassett med 50 mm bollar till Flexible L Bomull 10 kg - 503939

Använd påslakan – det skyddar täcket!

SÄKERHET:

- Om Protac Bolltäcke™ används av en person som inte kan ta vara på sig själv ska personen hållas under uppsyn.
- Protac Bolltäcke™ ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- Får ej användas under tvång.
- Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- När Protac Bolltäcke™ används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där Protac Bolltäcke™ ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- Bör inte användas nära öppen eld.

 Se ytterligare säkerhetsinformation i Protacs bruksanvisning.

Exempel på användningsområden

Protac Bolltäcke™ används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt mot kroppen så att bollarna känns tydligt.
Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av Protac Bolltäcke™ kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.




Det går även bra att ligga ovanpå Protac Bolltäcke™. Då ger bollarna sinnesstimulering på ryggen.



Skötsel

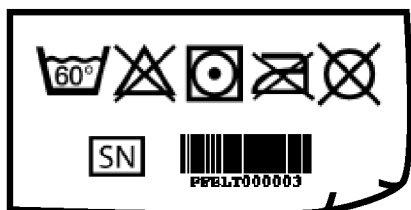

- 1 Öppna täckets dragkedja.
- 2 Tag ut kassetterna ur täcket genom att lossa kardborrefästena.
- 3 Tvätta en kassett åt gången.
- 4 Sätt fast kassetterna i kardborrefästena efter tvätt.

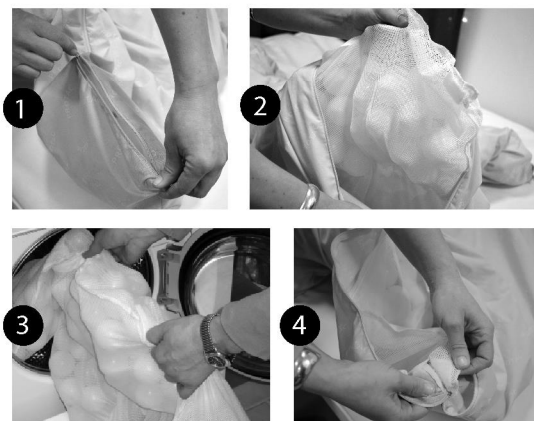

Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

Packa täcket i väskan

- 1 Vik täcket i fyra lager.
- 2 Rulla ihop täcket och lägg det i väskan.



I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac Bolltäcke™.

Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemptvättas



För inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG