

Protac SensOn®

En sinnesstimulerande tyngdkrage som ger sinnesstimulering av nacke, skuldra och bröst.



Beskrivning

Protac SensOn® är till största del gjord av bomull och den är fylld med 15 mm plastbollar.

Art. nr.	Benämning	Storlek	Vikt (ca)
504493	Tyngdkrage Protac SensOn® Svart	Junior	2 kg
504494	Tyngdkrage Protac SensOn® Svart	XS/S	2.5 kg
504495	Tyngdkrage Protac SensOn® Svart	M/L	3 kg
504567	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul	Junior	2 kg
504568	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul	XS/S	2.5 kg
504569	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgul	M/L	3 kg
504570	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå	Junior	2 kg
504571	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå	XS/S	2.5 kg
504572	Tyngdkrage Protac SensOn® Ljusgrå	M/L	3 kg

Bakgrund

Protac SensOn® stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Protac SensOn® har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac SensOn®

Tyngdkragen Protac SensOn® är fylld med plastbollar vilket ger ett punktvis tryck. Teorin utgår ifrån hur hjärnan bearbetar sinnesintryck och hur man kan påverka olika sinnesstimuli. Detta via tyngd och tryck i det taktila sinnet (beröringssinnet) i huden och det proprioceptiva sinnet (rörelsesinnet) i muskler och leder. Bollarnas tryck och rörelse påverkar de här sinnen. Tyngdkragen ökar koncentrations- och inlärningsförmågan, den har även en trygghetskappande effekt. Placera tyngdkragen på axlarna.

Produktfakta

Yttertyg: 88 % bomull, 9% polyester och 3% elastan
Fyllning: EVA*-bollar
Livslängd: 2 år
CE-märkning: 93/42/EEG klass 1

PRODUKTINFORMATION

Protac SensOn® 15 mm bollar

Skötselansvisning

Tvättråd: 40 grader. Parfymfritt tvättmedel utan blekmedel rekommenderas. Bör tvättas separat de tre första gångerna. Den medföljande tvättpåsen ska användas.

Tvättmaskin: Minsta kapacitet 6 kg.

Torkning: Får ej torktumlas.

Användningsområde

Protac SensOn® är en avkopplande krage som ligger naturligt och bekvämt runt om nacken, axlarna och bröst. Tyngden och den taktila stimulansen hos de små bollarna sänker axlarna och ger en avslappnad nacke. Det är jämförbart med ett par lugna, fasta händer som håller på axlarna.

Kragen är diskret och används i sammanhang där man kan behöva hjälp med att dämpa oro och ångest. Den skapar också välbefinnande, trygghet och kan leda till förutsättningar till bättre koncentrations- och inlärningsförmåga. Används med fördel i klassrummet, på jobbet, i måltidssituationer, i samtal, vila eller i ADL-träning.

Introduktion



- Tänk på att introducera Protac SensOn® när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska använda Protac SensOn®.
- Utvärdera hur effekten av Protac SensOn® blir, användningstiden är individuell.
- Många upplever att effekten finns kvar en tid efter att den använts, ibland kan den därför användas i förebyggande syfte, t.ex. inför en situation som användaren upplever som en svårighet.

Säkerhet

- Får inte, utan uppsyn, användas av personer med dålig balans.
- Får inte, utan uppsyn, användas av personer som inte kan ta hand om sig själva.
- Får inte användas i närheten av öppen eld.
- Får inte användas att sova med om natten.
- Får inte användas av barn under tre år, då den innehåller smådelar.
- Får inte användas vid transport i fordon, varken av förare eller passagerare.
- Var uppmärksam på användarens reaktioner.
- Var uppmärksam så att du inte snubblar på kragen om den faller ned på golvet.
- Se till att bollpåsar ligger längst ned i ryggen tas ut om användaren sitter i rullstol.
- Får inte värmas i mikrovågsugn eller med hjälp av andra värmekällor.

Användning av produkten

Tyngdkragen Protac SensOn® tas på så att storleksetiketten och stickningen sitter mitt på nacken - se till att den mjuka, enfärgade tyget är vänt in mot huden.

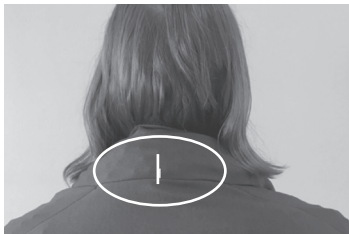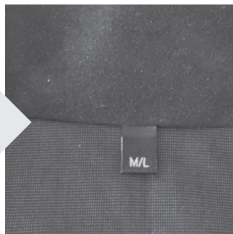


Protac SensOn® placeras över nacken. Bollarna fördelas med händerna så att tyngdkragen känns skön att bära.




Protac SensOn® kan knäppas under armarna.

Nedersta påsen med bollar ska tas ut ur kragen om användaren sitter i rullstol.



 I Protacs bruksanvisning som medföljer finns mer information om Protac SensOn®.

Skötsel

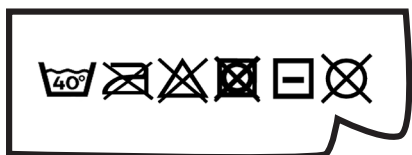

*EVA

EVA är en eten-vinylacetat-sampolymer. Ingen av dessa monomerer, eten och vinylacetat är farliga. EVA är en genomskinlig, flexibel och böjlig (nästan gummirjuk utan mjukgörande tillsatser) plast även vid mycket låga temperaturer (ned till -70 °C) med god motståndskraft mot andra kemikalier och används b.l.a. till nappar, handtag, böjbara/mjuka slangar (t.ex. för bryggerier och i dammsugare), till skyddshandskar, samt i elektriska installationer. EVA-plast är en ofarlig plast, om inte farliga tillsatser är tillsatta, så som t.ex. halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter.

Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



Får inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG klass 1