

Protac Bolltäcke™ – ett rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel



Bakgrund

Protac Bolltäcke™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmedvetenheten. Protac Bolltäcke™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolltäcke™

De löst liggande bollarnas vikt ger ett punktvis tryck på kroppen, och därmed stimuleras såväl beröringssinnet som muskler och leder. Stimulansen har en hämmande och organiserad inverkan på impulser till centrala nervsystemet. Detta ökar förmågan att hantera kroppen och dess gränser. Därför har Protac Bolltäcke™ en rogivande och trygghetsskapande effekt.

Materialval

Protac Bolltäcke™ tillverkas i Bomull eller Trevira CS* (flamskyddat).

Protac Bolltäcke™ tillverkas med olika storlekar på bollar. 50 mm stora bollar i vuxentäcke "L" (en vuxen person har 50 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).

38 mm stora bollar i juniortäcke "S" (ett barn har 38 mm mellan sina sensoriska beröringspunkter).

Varufakta Art.nr 503458

Protac Bolltäcke™ Flexible 50 mm bollar L Trevira CS ca 7 kg*

Flexible serien är indelade i fickor med två eller fyra bollpåsar som lätt kan tas ut och tvättas i en tvättmaskin med maxkapacitet på 6 kg. Flexible modellerna gör det också möjligt att sätta ihop ett eget täcke utifrån användarens behov av sinnesstimulans.

Innehåll: Fyra st. uttagbara kassetter fyllda med 50 mm plastbollar.

Storlek: 140x200 cm

Material: Trevira CS*

Vikt: ca 7 kg

Tillverkarens artikelkod: 100-202-V

*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepade tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibren har dessutom en hög ljusåktighet, det vill säga en lägre grad av blekning.

Skötselanvisning SE KORTINFO SID 2

Ta ut påsarna ur överdraget. Överdrag och påsar tvättas separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel.

Användningsområden SE KORTINFO SID 2

Många använder Protac Bolltäcke™ både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsutfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under Protac Bolltäcke™ finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsutfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion av Protac Bolltäcke™ SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon skall ligga under täcket.
- Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt skall märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren från fötterna och upp.
- Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och upp.
- Om personen upplever ökad värme i samband med användande av bolltäcket, sänk temperaturen i sov miljön.

Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503388
Inkontinensskydd - 500454
Vadderat överdrag Trevira CS* - 503646
Transportväska - 503765

Reservdelar:

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäcke™ Flexible L Trevira CS - 503933
Kassett med 50 mm bollar till Flexible L Trevira CS - 503936

Använd påslakan – det skyddar täcket!

SÄKERHET:

- ⚠ Om Protac Bolltäcke™ används av en person som inte kan ta vara på sig själv ska personen hållas under uppsyn.
- ⚠ Protac Bolltäcke™ ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- ⚠ Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- ⚠ När Protac Bolltäcke™ används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- ⚠ Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- ⚠ Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där Protac Bolltäcke™ ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- ⚠ Bör inte användas nära öppen eld.
- ⚠ Protac Bolltäcke™ med bollar av polystyren/polypropylen innehåller småpartiklar och bör inte användas till barn under 3 år utan uppsikt.

Exempel på användningsområden

Protac Bolltäcke™ används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt mot kroppen så att bollarna känns tydligt. Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av Protac Bolltäcke™ kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.



Det går även bra att ligga ovanpå Protac Bolltäcke™. Då ger bollarna sinnesstimulering på ryggen.



Skötsel

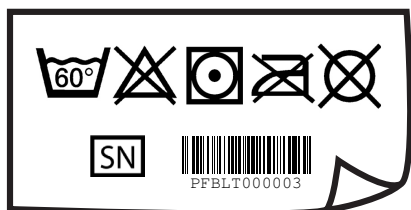





Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

1 Öppna täckets dragkedja.

2 Tag ut kassetterna ur täcket genom att lossa kardborrefästena.

3 Tvätta en kassett åt gången.

4 Sätt fast kassetterna i kardborrefästena efter tvätt.

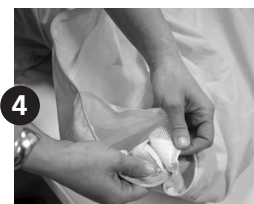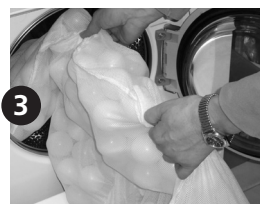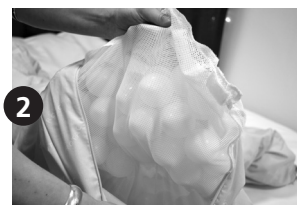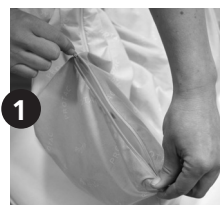

Packa täcket i väskan

1 Vik täcket i 4 lager.

2 Rulla ihop täcket och lägg det i väskan.



Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



För inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG