

ART.NR 504215

PROTAC BOLLTÄCKE™ CLASSIC ÖPPNINGSBART POLYSTYREN L BOMULL CA 3 KG

Protac Bolltäckes™ – ett rogivande och sinnesstimulerande hjälpmedel



Bakgrund

Protac Bolltäckes™ stimulerar sinnen och hjälper till att öka kroppsmidvetenheten. Protac Bolltäckes™ har utvecklats med utgångspunkt från den amerikanska arbetsterapeuten och psykologen A. Jean Ayres teorier om sinnesstimulering (SI).

Så fungerar Protac Bolltäckes™

Täcket innehåller små polystyrenkuler indelat i fyra kassetter. Det gör att täcket faller skönt intill kroppen och ger användaren en omslutande taktil sinnesupplevelse.

Materialval

Protac Bolltäckes™ tillverkas i Bomull eller Trevira CS* (flamskyddat).

Varufakta Art.nr 504215

Protac Bolltäckes™ Classic Öppningsbart Polystyren L Bomull ca 3 kg

Täcket är indelat i fickor med fyra kassetter som lätt kan tas ut och tvättas i 60 grader i en tvättmaskin med maxkapacitet på 6 kg.

Innehåll: Fyra stycken uttagbara kassetter fyllda med polystyrenkuler.

Storlek: 140x200 cm

Material: Bomull

Vikt: ca 3 kg

Skötselansvisning SE KORTINFO SID 2

Ta ut kassetterna ur överdraget. Överdrag och kassetter tvättas, i medföljande tvättpåse, separat i 60 grader i en tvättmaskin med kapacitet för minst 6 kg. Kan torkas i torktumlare i högst 30 grader. Får inte kemtvättas. Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt vättmedel utan blekmedel.

Tillverkarens artikelkod: 100-209-V-KK

*Trevira CS

Trevira CS är en speciell polyestertyp med en kemisk uppbyggnad som ger fibern en permanent flamsäkerhet. Flamsäkerheten försvinner inte efter upprepad tvätt, kemtvätt eller lång tidsanvändning. Med hänsyn till flamsäkerhet uppfyller Trevira CS alla gängse brandnormer som gäller inom Europa, både inom den privata och offentliga sektorn. Trevira CS-fibren har dessutom en hög ljusåthet, det vill säga en lägre grad av blekning.

Användningsområden SE KORTINFO SID 2

Många använder Protac Bolltäckes™ både till att sova med på natten och/eller vila under dagen. En person med nedsatt kroppsuppfattning känner ofta en fysisk och/eller psykisk oro/rastlöshet.

Under Protac Bolltäckes™ finner man trygghet och ro bland annat genom att täcket hjälper till att öka personens kroppsuppfattning. Det hjälper många att förkorta sin insomningstid och få en tryggare och djupare sömn. Detta ger mer energi och möjlighet att klara sin vardag.

Introduktion av Protac Bolltäckes™ SE KORTINFO SID 2

- Tänk på att introducera täcket när användaren har en "bra dag".
- Om användaren kan ta emot instruktioner, tala om hur länge han/hon ska ligga under täcket.
- Minst 10 minuter behövs för att täckets effekt ska märkas. Det är bra att gradvis öka tiden med täcket.
- Vistas i en avskärmd miljö fritt från sinnesintryck.
- Bädda ner användaren från fötterna och upp.
- Packa in personen med fasta lugna tryck från fötterna och upp.
- Om personen upplever ökad värme i samband med användande av bolltäckes™, sänk temperaturen i sov miljön.

Tillbehör:

Inkontinensskydd med nät - 503388
Inkontinensskydd - 500454
Vadderat överdrag bomull - 503644
Transportväska - 503766
Tvättpåse - 504287

Reservdelar:

Överdrag med sektioner till Protac Bolltäckes™ L Trevira CS - 503932
Kassett med polystyrenkuler till 504215 Bomull - 504285

Använd påslakan – det skyddar täcket!

SÄKERHET:

- ⚠ Om Protac Bolltäckes™ används av en person som inte kan ta vara på sig själv ska personen hållas under uppsyn.
- ⚠ Protac Bolltäckes™ ska inte användas av personer med svag lungkapacitet utan tillsyn.
- ⚠ Var uppmärksam på överstimulering, vilket kan vara fallet om användaren antingen sover för mycket eller blir hyperaktiv.
- ⚠ När Protac Bolltäckes™ används med ett inkontinensskydd är det viktigt att vara uppmärksam på de risker detta kan innebära. Samma riskföreskrifter gäller som vid användning av plastpåsar.
- ⚠ Det är inte lämpligt att röka när man ligger under täcket. Tappad glöd eller cigaretter kan orsaka brännskador.
- ⚠ Lämna inte en påslagen dator eller andra elektriska apparater i sängen där Protac Bolltäckes™ ligger då dessa avger värme och kan medföra att överdraget försvagas eller i värsta fall förorsaka antändning av den elektriska enheten då denna inte kan kylas.
- ⚠ Bör inte användas nära öppen eld.
- ⚠ Protac Bolltäckes™ med bollar av polystyren/polypropylen innehåller småpartiklar och bör inte användas till barn under 3 år utan uppsikt.

Exempel på användningsområden

Protac Bolltäcke™ används som ett vanligt täcke att sova med. Täcket ska ligga tätt och omslutande mot kroppen. Använd ett vanligt påslakan.




För att förstärka känslan av Protac Bolltäcke™ kan det vara skönt att bli omstoppad med långsamma djupa tryck.



Det går även bra att ligga ovanpå Protac Bolltäcke™. Då ger täcket sinnesstimulering på ryggen.



Skötsel

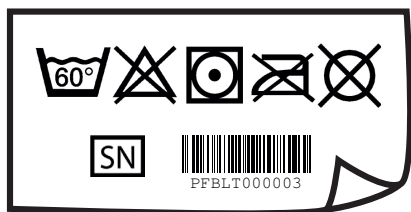

Vi rekommenderar att täcket tvättas med parfymfritt/doftfritt tvättmedel utan blekmedel. Torktumla vid max. 30°C eller lufttorka.

- 1 Öppna täckets dragkedja.
- 2 Tag ut kassetterna ur täcket genom att lossa kardborrefästena.
- 3 Tvätta en kassett åt gången i tvättpåsen.
- 4 Sätt fast kassetterna i kardborrefästena efter tvätt.



Packa täcket i väskan

- 1 Vik täcket i fyra lager.
- 2 Platta till täcket och lägg det i väskan.



Symbolförklaring



Max tvätttemperatur



Får ej strykas



Användningsinformation



Tillverkare



Får ej blekas



Får ej kemtvättas



För inomhusbruk



Produktens serienummer



Torktumlare kan användas med låg temperatur (max 30°C)



Varning: se tillhörande dokument



CE-godkännande enligt direktiv om medicinsk utrustning 93/42/EEG