

## Bruksanvisning

### Produktfakta

Artikelnummer: 501252, 501253

Modell: Movin´sit Junior och Vuxen

Material: Latexfri Vinyl

Mått: Junior 26 x 26 x 7 cm

Vuxen 36 x 36 x 7 cm

Färg: Blå

Medicintekniskt klassad produkt enligt MDR 2017/745

### Exempelbild



### Användningsområden

Movin´ Sit är en uppblåsbar sittdyna, idealisk för att aktivera bålmusklerna och ge stöd åt ryggraden. Dess kilform har noggrant designats för att uppmuntra en korrekt hållning, eftersom den tillåter en balanserad bäckenposition. Denna enhet efterliknar den dynamiska sittrörelsen hos en träningsboll och ger samma fördelaktiga effekter. Genom uppblåsning kan du enkelt justera stabilitetsnivån på din stol.

Varför har en del personer svårt att sitta stilla? Det är ofta en effektiv strategi att vara i rörelse för att kunna hålla koncentrationen och vakenheten igång, samt även ett sätt att känna sin egen kropp. Genom att erbjuda ett rörligt sittande samt något tungt att ha i knät underlättar vi för personen att sitta stilla en längre stund.

### Så använder du Movin´Sit


1. Ta ut pluggen ur Movin´Sit.
2. Blås upp Movin´Sit med munnen eller med en pump.
3. Sätt i pluggen igen.
4. Placera Movin´Sit på stolen. Du kan välja själv om du vill ha den höga delen framåt eller bakåt.

### Rengöring

Avtorkning görs med våtservetter med ytdesinfektion. Ljummet vatten och mild tvål.

### Säkerhets och varningsinformation

Slutgiltig bedömning för lämpligheten i att använda produkten görs av stödperson. Användning av våra produkter skall alltid ske under uppsikt av ansvarig vuxen.

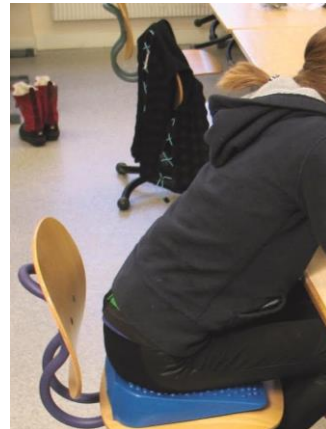

### Tillbehör

- Reservplugg art nr. 504131
- Pump art nr: 504821

**CE** Uppfyller de väsentliga kraven enligt gällande lagstiftning MDR 2017/745