

Ytterligare praktiska rekommendationer:

- För att skydda materialet, bör Oliz®-produkten endast användas inomhus.
- Det rekommenderas att man använder båda händerna vid flytt av produkten.
- Om man transporterar produkten i ett fordon, måste produkten säkras ordentligt för att förhindra att den hoppar runt och orsakar skador.
- Om det uppkommer ett hål i produkten, ska den tas bort från personen. Oliz®-produkten ska regelbundet kontrolleras för skador, eftersom innehållet kan vara farligt för barn under 3 år.

Avseende miljöskydd:

Skydda miljön genom att inte avyttra produkten i hushållssoporna. Klipp produkten i bitar och fördela de separata komponenterna, såsom plast, tyg och metall, enligt lokala föreskrifter - i relevanta återvinningssystem.

Garanti: Vid produktionsfel ger Oliz® två års garanti. Garantin gäller endast om produkten används på avsett sätt. Skador som uppkommer på grund av felaktig eller olämplig användning täcks inte av garantin.

För ytterligare frågor om användningen av Oliz®-produkten, är man välkommen att kontakta oss.

Order: År: Produkt: Lill-Hängke



Godkänd enligt EN71-1-71-2-71-3 och EN12182
Dansk Design - producerad inom EU - www.oliz.dk
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK - Tel.: +45 20 78 79 54

Oliz® producerar hjälpmedel som stödjer den sensoriska integrationen. Målet är att fokusera på personer som behöver oavbrutet stöd för att stärka sin egen självkänedom.

Hur påverkar Lill-Hängkes omfamning? Placera Lill-Hängke på personens underkropp och lägg armarna, en åt gången, över axlarna. Målet är att hjälpa personen, att känna sig avslappnad, trygg och omtyckt. Lill-Hängke kan användas av både barn och vuxna med behov av att lära känna sig själva.

Den vänlige sengångaren bidrar med att föra in avslappning och trygghet i vardagen. Detta känner både barn och vuxna av med Lill-Hängkes vänliga utseende och effektiva funktionalitet. Lill-Hängke skapar tillit, trygghet och kan användas som ett betydelsefullt kommunikationsmedel mellan barn och vuxna.

Produkten kan transporteras i en väska. Vid korrekt användning, har ni en produkt med lång hållbarhet. Var noga med att spara detta informationsblad för framtida behov.

Produkt: Lill-Hängke



Viktiga instruktioner före användning av Oliz®-produkten:

Lill-Hängke från Oliz® är en 3 kg tung, mycket välkomnande och vänlig sängångare. Han finns alltid där för personer som behöver en riktigt stor kram. Lill-Hängke är ett terapeutiskt hjälpmedel som hjälper personer att uppleva sig själva och slappna av under stressiga situationer.

Oliz® Lill-Hängke är avsedd för personer i åldern +3 år.

Storlek: höjd 310 mm - bredd 520 mm – vikt 3 kg.

Material - textil: 95% polyester
5% bomull / lin

Material - invändigt: 40% polyeten
60% polyester

Material - arm: 60% metallkulor
40% polyeten

Oliz® använder sig endast av material som inte innehåller cancerframkallande ämnen och därför har produkten inte behandlats med flamskyddsmedel.

Skötselråd:

- Kan tvättas på skontvätt i tvättmaskin vid 40 grader.
- Får inte blekas.
- Får inte strykas.
- Inte lämplig att torktumlas.
- Använd inte rengöringsmedel på produkten.



Innan man tvättar produkten, ska man ta bort de lösa påsarna i armar och bak via blixtlåsöppningen. Metallkulor rostar snabbt när de är våta. Håll därför påsarna borta från vatten. Stäng blixtlås före tvätt. Efter tvätt ska man återskapa djurets ursprungliga form. Detta gör man genom att forma det med händerna. Tvätta produkten i ett örngott. Oliz® rekommenderar att man avlägsnar ytlig smuts med en fuktig trasa och tvål. Maskintvätt bör endast ske tillfälligtvis.

Viktiga instruktioner:

- Lill-Hängke från Oliz® placeras i första steget på personens underkropp, sedan lägger man varsamt armarna runt personens nacke. Se separat dokument.
- Det är viktigt att ha uppsikt över personen som använder produkten, eftersom produktens tyngd kan påverka personen fysiskt.
- En Oliz®-produkt bör endast användas med personens samtycke. Om personen upplever obehag vid användning, ska produkten avlägsnas.
- Var uppmärksam på, att personen inte vänjer sig alltför mycket vid produkten och därmed mister effekten av den. Produkten ska ses som ett terapeutiskt hjälpmedel.
- När den önskade effekten har erhållits, ska produkten tas bort med försiktighet. Man får inte kasta runt produkten, eftersom produktens tyngd kan orsaka skador både på produkten och personer i dess närhet.

Varningar:

- Om personen är mycket rörelsebegränsad på grund av motoriska och / eller fysiska orsaker, får produkten endast användas med särskild försiktighet.
- Vi rekommenderar i allmänhet, att personer som använder en Oliz®-produkt ska vara under uppsikt vid användning.
- Håll personens luftvägar fria vid användning av produkten.
- En Oliz®-produkt ska inte användas i närheten av vatten, eftersom det kan föreligga en risk för drunkning.
- Om personen har en pacemaker, ska man ägna särskild uppmärksamhet åt denna produkt. Om produkten placeras på bröstet och personen upplever obehag, kan detta indikera en viss påverkan av vår produkt. I sådana fall ska man omedelbart ta bort produkten. Metallen i produkten är inte magnetisk.

Förvaring:

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att Oliz®-produkten förvaras utom räckhåll för personer som kräver särskild tillsyn.
- Förvara Oliz®-produkten på ett säkert avstånd från vassa / heta föremål och öppna lågor.