

Inkontinensskyddet är till för att underlätta den praktiska hanteringen av användandet av bolltäck.



### Varufakta

- Storlek: 140\*100cm
- Material: Polyuretan

### Skötselanvisning:

- Tvättråd: 90 grader
- Typ av tvättmaskin: Standard
- Tork: Tumla (30 grader) eller dropptorka

### Användning:

- Trä inkontinensskyddet över bolltacket.
- Förslut med dragkedjan och se till att dragkedjan hamnar vid fotändan.
- Sätt på ett vanligt påslakan.

*Flamsäkra påslakan kan köpas på [www.komikapp.se](http://www.komikapp.se)*

### Viktigt:

När bolltacket används med ett inkontinensskydd ovanpå är det viktigt att tänka på de risker som detta medför. Samma riskföreskrifter som vid användning av plastpåsar gäller.

- Bolltäck med inkontinensskydd får inte användas av barn utan tillsyn.
- Bolltäck med inkontinensskydd får inte användas av personer, som inte kan ta vara på sig själva, utan tillsyn.
- Bolltäck med inkontinensskydd får inte dras över huvudet.