

ART.NR 503387

PROTAC INKONTINENSSKYDD
MED NÄT TILL PROTAC BOLLTÄCKE S

ART.NR 503388

PROTAC INKONTINENSSKYDD
MED NÄT TILL PROTAC BOLLTÄCKE L

Inkontinensskyddet är till för att underlätta den praktiska hanteringen av användandet av bolltäcke.



Varufakta

- Storlek: 140*200cm (L täcken) eller 140*100cm (S täcken)
- Material: Polyuretan samt nätdelen i mechtyg (nätliknande material med luftgenomsläpp).

Skötselanvisning:

- Tvättråd: 90 grader, vräng gärna ut och in för att förlänga livstiden på produkten.
- Tork: Tumla (30 grader) eller droptorka

Användning:

- Öppna dragkedjan helt och lägg i Bolltäckets.
- Säkerställ att nätdelen placeras vid huvudändan.
- Förslut med dragkedjan och se till att dragkedjan hamnar vid fotändan.
- Sätt på ett vanligt påslakan.

Flamsäkra påslakan kan köpas på www.komikapp.se

Viktigt:

När bolltäckets används med ett inkontinensskydd ovanpå är det viktigt att tänka på de risker som detta medför. Samma riskföreskrifter som vid användning av plastpåsar gäller, även om inkontinensskydd med mechtyg upptill används.

- Bolltäcke med inkontinensskydd får inte användas av barn utan tillsyn.
- Bolltäcke med inkontinensskydd får inte användas av personer, som inte kan ta vara på sig själva, utan tillsyn.
- Bolltäcke med inkontinensskydd får inte dras över huvudet.